



Calibrateur de microalbumine

Code	Nom du produit	Taille de l'emballage
CL0004	Calibrateur Microalbumine	1 X 1 ml

UTILISATION PREVUE

Calibrateur liquide à base humaine à utiliser comme calibrateur dans les essais immunoturbidimétriques pour la microalbumine

COMPOSITION

Le Calibrateur de Microalbumine GDP est basé sur du plasma humain défibriné avec une solution saline tamponnée au phosphate, stabilisé en liquide et filtré à travers un filtre de 0,2 µm.
Azide de sodium : 0,95%

PRÉPARATION

Le calibrateur de microalbumine est liquide, prêt à l'emploi.

STABILITÉ ET STOCKAGE

Stockage : à 2 - 8 °C
Stabilité : jusqu'à la date de péremption
Stabilité après ouverture : 6 semaines à 2 - 8 °C
NE PAS CONGELER !

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser ce calibrateur de la même manière que celle spécifiée pour le réactif et/ou l'instrument utilisé.
2. Laisser le calibrateur s'équilibrer à la température ambiante (22 - 28 °C) avant de l'utiliser.
3. Le calibrateur ne doit pas être laissé au repos pendant de longues périodes répétées (jusqu'à 6 heures) à température ambiante. Conserver les flacons hermétiquement fermés en permanence lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'éviter toute contamination microbienne. Conserver les flacons au réfrigérateur lorsqu'ils ne sont pas utilisés

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

1. Pour le diagnostic in vitro.
2. Chaque don individuel destiné à la fabrication du calibrateur de protéine a été testé pour l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg), l'anti-hépatite C (anti-HCV) et l'anti-VIH 1 et VIH 2 par les tests exigés par la FDA. Étant donné qu'aucune méthode de test ne peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne contiennent pas le VIH-1/2 et les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, ce matériel et tous les échantillons de patients doivent être manipulés comme s'ils étaient susceptibles de transmettre des maladies infectieuses.
3. Les réactifs contenant de l'azote de sodium doivent être manipulés avec précaution : Ne pas ingérer ou laisser entrer en contact avec la peau ou les muqueuses ! L'azote de sodium peut former des azides explosifs au contact de métaux lourds tels que le cuivre ou le plomb.

GESTION DES DÉCHETS

Veuillez vous référer aux exigences légales locales.

DONNÉES D'ESSAI SPÉCIFIQUES AU LOT

Les valeurs et la date de péremption sont spécifiques au lot.

LOT :6545		EXP :2025-05-31	
Paramètres		Valeur attribuée	
Microalbumine		400 mg/L	
Les valeurs sont traçables selon RPPHS/ERM-DA470 de l'IFCC.			



